

InBody

atix
health med

InLab

ESTADIÓMETRO PORTATIL
POR ONDAS ULTRASONICAS



- Rango de medición desde 50 a 200 cm.
- Mide en solo 1 segundo.
- Funciona con pilas comunes (AAA).
- Se opera con solo un botón y fácil interfaz.
- Diseño cómodo y moderno.




FORMA DE USO

Encender InLab mediante el botón.
Aparecerán automáticamente los datos
de temperatura y humedad ambiente.

Si presiona el botón nuevamente,
la pantalla cambia al modo medición.

Coloque el extremo del InLb en la
cabeza y manténgalo horizontalmente.

Cuando aparece el mensaje "PUSH",
presione nuevamente el botón
para obtener la medición.
No bloquee el sensor de
ultrasonido con sus dedos.

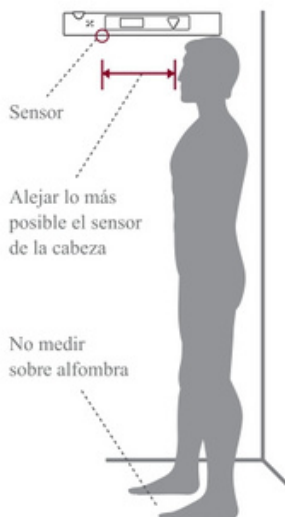

● ● 2 colores disponibles

ESPECIFICACIONES

Items de medición	Altura, temperatura, humedad
Rango de altura	50 ~ 200 cm
Rango de error	± 0.5 cm
Otros rangos de medición	Temperatura 16 ~ 40 °C (± 1 °C) Humedad 30 ~ 80% (± 7%)
Duración de la medición	1 segundo (Máx. 7 segundos)
Sensor	Sensor ultrasónico, sensores de temperatura y humedad
Consumo actual	Por debajo de 100 mA
Consumo energía	DC 3V (Pilas 1.5V AAA - 4EA)
Tipo de display	LCD
Colores	Verde, rosa, azul y gris
Dimensión	43 x 44 x 300 mm
Medidas del dispositivo	238 g
Temperatura de operación	16~40 °C, 30~80% RH
Temperatura de Almacenaje	-10~70 °C